

**MYLUNOS DUO –  
DAS MULTITALENT FÜR ALLE FÄLLE**  
FÜR PRÄVENTION UND MINIMALINVASIVE THERAPIE



# DAS MULTITALENT FÜR ALLE FÄLLE.

Das MyLunos Duo® kombiniert die zwei wichtigsten Behandlungsmethoden bei einer Prophylaxesitzung: Pulverstrahlen und Ultraschall. Das Kombigerät ermöglicht eine vollständige Prophylaxebehandlung mit nur einem Gerät – von der supra- und subgingivalen Zahnstein- und Konkremententfernung mit Ultraschall bis zur Entfernung von Verfärbungen und Biofilm mit dem Pulverstrahl.

## FLEXIBLES WASSERSYSTEM



MyLunos Duo® verfügt für beide Anwendungsbereiche Pulverstrahl und Ultraschall über einen Festwasseranschluss sowie für Ultraschall zusätzlich über einen aufsteckbaren Wassertank mit 500 ml Füllvolumen.



## SCALER HANDSTÜCK MIT LED



Besonders leichtes und handliches Scaler-Handstück mit LED-Beleuchtung für eine optimale Einsicht des Arbeitsbereiches im Patientenmund.



Video zu MyLunos Duo®

PULVERSTRAHLEN

ULTRASCHALL

RECALL

## WECHSELBARE DÜSEN PERIO UND SUPRA

Durch ein schnelles Tauschen der beiden Düsen wird ein reibungsloser Behandlungsablauf ermöglicht. Durch Drehbarkeit um 360° können schwer erreichbare Stellen im Patientenmund gezielter behandelt werden.



## PULVERBEHÄLTER SUPRA UND PERIO

Es stehen 2 Pulverbehälter zur Verfügung: Supra-Behälter für die supragingivale Verwendung von Lunos® Prophylaxepulver Gentle Clean und der Perio-Behälter für das feinkörnigere Lunos® Prophylaxepulver Perio Combi.


## ZWEIFACH-SCHUTZ VOR VERBLOCKUNG

Der stetige Dauerluftstrom im Pulver-Wasserstrahlhandstück schützt aktiv vor Verblockung. Zudem sind alle Lunos® Prophylaxepulver vollständig wasserlöslich.



## INTUITIVES TOUCH DISPLAY

Alle Funktionen können intuitiv angesteuert werden. Die Oberfläche lässt sich schnell und einfach reinigen und desinfizieren.

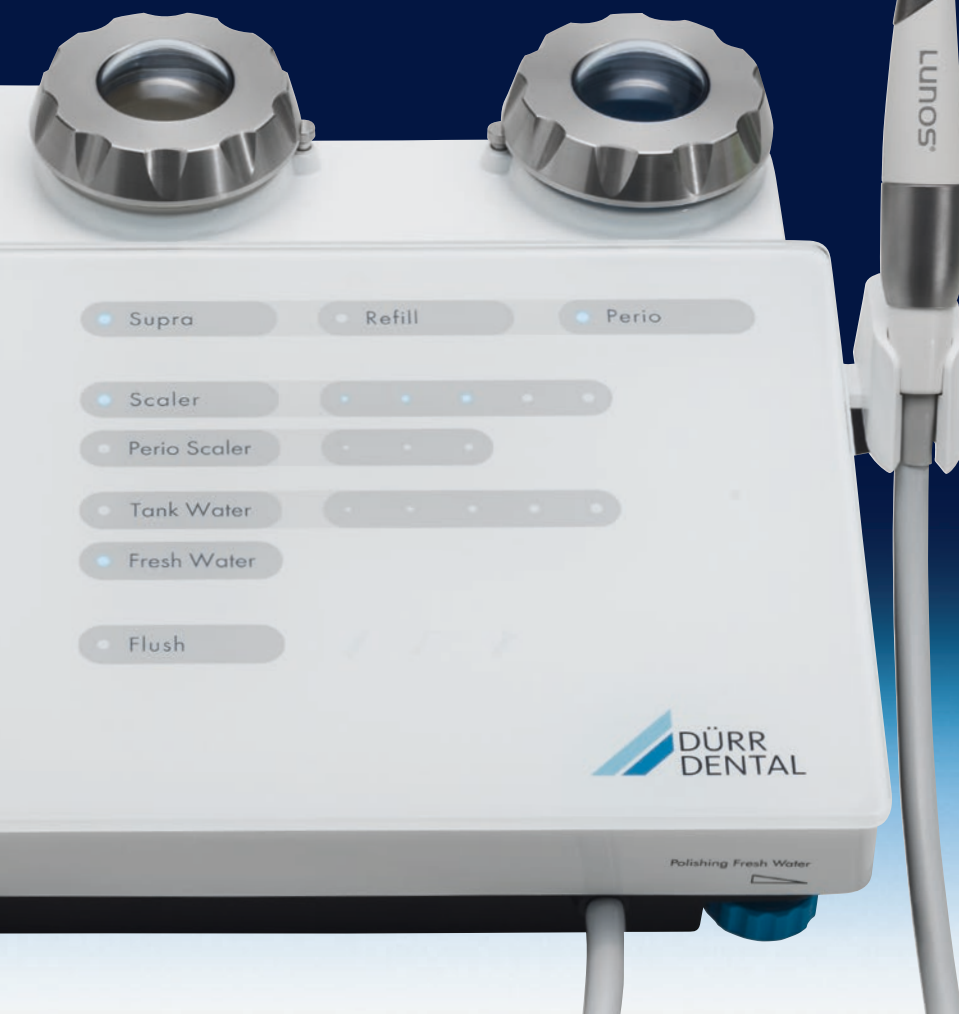

# PULVERSTRAHLEN – MIT MYLUNOS DUO

Die Pulverstrahl-Funktion des MyLunos Duo® Kombigerätes sorgt mit der passenden Düse und dem passenden Prophylaxepulver für eine gründliche Pulverstrahlanwendung – sowohl sub- als auch supragingival. Die aufeinander abgestimmten Komponenten und Funktionen sorgen für bestmögliche Ergebnisse und sind besonders schonend und angenehm für den Patienten.

## MYLUNOS DUO PULVERSTRAHL

### Bedarfsgerechte Anwendung:

- Sub- und supragingivale Pulverstrahlanwendung
- Flexibles und schnelles Umstellen zwischen Funktionen und Pulver während der Behandlung

### Schutz vor Verblockung:

- Stetiger Dauerluftstrom im Handstück
- Vollständig wasserlösliche Lunos® Prophylaxepulver

### Besonderer Patientenkomfort:

- Das Wasser wird während der Behandlung erwärmt
- Die Lunos® Prophylaxepulver schmecken angenehm und hinterlassen keine Pulverrückstände im Patientenmund



## WECHSELBARE DÜSEN SUPRA UND PERIO

Für das MyLunos Duo® Pulverstrahl-Handstück stehen zwei verschiedene Düsen für die supra- bzw. subgingivale Anwendung zur Verfügung. Sie lassen sich jeweils um 360° drehen und ermöglichen einen leichteren Zugang zu schwer erreichbaren Stellen im Patientenmund. Die beiden Düsen lassen sich schnell und leicht während der Behandlung austauschen, was ein hocheffizientes Arbeiten erlaubt.



### FÜR SUPRAGINGIVALE ANWENDUNGEN

Die Düsenöffnung hat einen idealen Öffnungswinkel und fokussiert den Pulverstrahl präzise auf einen großen Arbeitsbereich.

# STARK UND SANFT – LUNOS® PROPHYLAXEPULVER.

Für das MyLunos Duo® stehen die Lunos® Prophylaxepulver Gentle Clean und Perio Combi zur Verfügung. Der innovative Abrasivkörper Trehalose ist besonders wasserlöslich. Das Pulver schmeckt angenehm süß und ist dabei nicht kariogen, es hinterlässt keine Pulverrückstände im Patientenmund und schont die Mundschleimhaut.



- FREI VON:**
- ✓ TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN
  - ✓ LACTOSE
  - ✓ GLUTEN
  - ✓ FRUCTOSE



## LUNOS® PROPHYLAXEPULVER GENTLE CLEAN

Für die supragingivale Reinigung und Entfernung von extrinsischen Verfärbungen.

### Innovativer Abrasivkörper Trehalose:

- Korngröße ca. 65 µm
- nicht schleimhautreizend

### Beste Wasserlöslichkeit:

- hinterlässt keine Pulverrückstände im Patientenmund
- schont die Sauganlage



- FREI VON:**
- ✓ TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN
  - ✓ LACTOSE
  - ✓ GLUTEN
  - ✓ FRUCTOSE



## LUNOS® PROPHYLAXEPULVER PERIO COMBI

Für die subgingivale Biofilmentfernung und supragingivale Reinigung.

### Innovativer Abrasivkörper Trehalose:

- Korngröße ca. 30 µm
- nicht schleimhautreizend

### Beste Wasserlöslichkeit:

- hinterlässt keine Pulverrückstände im Patientenmund
- schont die Sauganlage

PERIO DÜSE



### FÜR SUBGINGIVALE ANWENDUNGEN

Der flexible und besonders schmale Perio-Tip wird steril verpackt geliefert und kann nach der Anwendung sicher entsorgt werden.

### KOMPATIBLES DÜSENSYSTEM

Die einzigartige Kompatibilität der Düsen mit dem mobilen MyLunos® Pulver-Wasserstrahlhandstück ermöglicht den flexiblen Einsatz des Zubehörs.



# ULTRASCHALL – MIT MYLUNOS DUO

Die Ultraschall-Funktion des MyLunos Duo® Kombigerätes, das schlanke und leichte Scaler Handstück mit LED-Beleuchtung und eine große Vielzahl an Instrumenten ermöglichen die gründliche sub- und supragingivale Konkrement- und Zahnsteinentfernung. Je nach verwendetem Instrument kann die passende Leistungsstufe einfach über das Touch-Display angewählt werden.

## MYLUNOS DUO ULTRASCHALL

### Auf einen Blick:

- Sub- und supragingivale Konkrement- und Zahnsteinentfernung
- Flexibler und schneller Wechsel zwischen Ultraschall und Pulverstrahl während der Behandlung
- Flexibles Wassersystem: Festwasseranschluss oder Wassertank mit 500 ml Füllvolumen

## MYLUNOS DUO SCALER HANDSTÜCK\*

### Optimale Handhabung:

- Leichtes und schlankes Scaler Handstück\*
- LED-Beleuchtung für optimale Einsicht des Arbeitsbereiches im Patientenmund
- Schneller Instrumentenwechsel und sicheres Aufschrauben durch Drehmomentschlüssel



# BEISPIELLOSE VIELFALT – SCALER INSTRUMENTE

MyLunos Duo® bietet eine große Vielfalt an Scaler Instrumenten\* und erlaubt damit den bedarfsgerechten Einsatz für die unterschiedlichsten Behandlungsfälle. Die Instrumente bestehen aus rostfreiem medizinischen Edelstahl, der Ansatz IC1 für die Implantat-Reinigung besteht aus 100 % PEEK (High-Tech-Kunststoff).

## SCALER INSTRUMENTE\*


### Bedarfsgerechte Anwendung:

- Große Instrumenten-Vielfalt (auch für Implantate)
- Flexibler Instrumentenwechsel über den Drehmomentschlüssel
- Verschieden einstellbare Leistungsstufen
- Alle Instrumente und Ansätze sowie der Drehmomentschlüssel sind vollständig aufbereitbar

### IM VERKAUFSPAKET ENTHALTEN

### OPTIONAL ERHÄLTICH


**S2**



Kürzere Arbeitsspitze, dreieckiger Querschnitt und abgerundete Oberfläche zum universellen Einsatz an interproximalen Flächen und posterioren Bereichen.

**Funktion:** Scaler


**S1-S**



Schmale, längere Arbeitsspitze, dreieckiger Querschnitt und abgerundete Oberfläche zur Entfernung von supragingivalem Zahnstein.

**Funktion:** Scaler


**P10**



Extralange, leicht gebogene Arbeitsspitze und abgerundete Oberfläche zum schonenden Entfernen von subgingivalen Konkrementen.

**Funktionen:** Supra und Scaler


**P16L**



Linksgewinkelte, kürettenförmige Arbeitsspitze zur supra- und subgingivalen Entfernung von Zahnstein und Biofilm in tiefen Taschen und Furkationen im Bereich der Prä-/Molaren.

**Funktion:** Perio Scaler


**P11**



Rechtsgewinkelte (15°), gebogene Arbeitsspitze und gerundete Oberfläche zum schonenden Entfernen von subgingivalen Konkrementen.

**Funktionen:** Supra und Scaler


**P16R**



Rechtsgewinkelte, kürettenförmige Arbeitsspitze zur supra- und subgingivalen Entfernung von Zahnstein und Biofilm in tiefen Taschen und Furkationen im Bereich der Prä-/Molaren.

**Funktion:** Perio Scaler


**P12**



Linksgewinkelte (15°), gebogene Arbeitsspitze und gerundete Oberfläche zum schonenden Entfernen von subgingivalen Konkrementen.

**Funktionen:** Supra und Scaler

**ICS + IC1**



Zweiteiliges Spezialinstrument mit Instrumentenhalter ICS und konischem Ansatz IC1 zur Reinigung von Implantatoberflächen und Restaurationen.

**Funktion:** Perio Scaler

[WWW.LUNOS-DENTAL.COM](http://WWW.LUNOS-DENTAL.COM)

DÜRR DENTAL SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)



**DÜRR  
DENTAL**  
DAS BESTE HAT SYSTEM